

CLEANISEPT®



PREVENT

OBERFLÄCHENDESINFEKTION UND -REINIGUNG NICHTINVASIVER
MEDIZINPRODUKTE MIT MECHANISCHER EINWIRKUNG

1 / 9

Gute Desinfektions- & Reinigungsleistung

Überzeugt mit einer guten Materialverträglichkeit
auch auf alkoholempfindlichen Flächen

Verzicht auf den Zusatz
von Farb- und Duftstoffen



FLÄCHE / DESINFEKTIONSMITTELKONZENTRATE

CLEANISEPT®



PREVENT

PRODUKTBESCHREIBUNG

2 / 9

CLEANISEPT ist eine Oberflächendesinfektion und -reinigung nichtinvasiver Medizinprodukte mit mechanischer Einwirkung. **CLEANISEPT** ist auf quartären Ammoniumverbindungen aufgebaut. Es ist parfümfrei, enthält weder Aldehyde noch Phenole und zeichnet sich durch eine gute Reinigungskraft aus.

CLEANISEPT ist geeignet zur Flächendesinfektion von abwaschbaren nicht porösen Flächen und für Bereiche, in denen neben der Erfüllung hoher hygienischer Anforderungen eine Geruchsbelästigung vermieden werden muss.

CLEANISEPT hat eine gute Materialverträglichkeit und eignet sich auch für die Anwendung auf Acrylglas.

ANWENDUNGEN UND HINWEISE

Anwendungsgebiete

Oberflächendesinfektion und -reinigung nichtinvasiver Medizinprodukte mit mechanischer Einwirkung.

Gemäß Biozidprodukte-Verordnung (BPR): Zur Flächendesinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar und Flächen aller Art. Geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich.

Anwendung

Nur zur professionellen Anwendung. Sichtbare Verschmutzungen sind vor der Desinfektion zu entfernen. Die zu desinfizierende Fläche mit einer ausreichenden Menge der frisch angesetzten **CLEANISEPT** Gebrauchslösung vollständig benetzen und diese mechanisch verteilen (Scheuer-Wisch-Desinfektion).

Konzentrat - nur verdünnt anwenden! Die Gebrauchslösung in der gewünschten Konzentration mit Wasser geeigneter Qualität (max. 40 °C) ansetzen.

Medizinprodukte, die bei bestimmungsgemäßem Gebrauch mit dem Körper in Kontakt kommen, nach Ablauf der Einwirkzeit mit einem nassen Tuch (Wasser geeigneter Qualität) abwischen.

Flächen und Arbeitsgeräte, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, nach der Einwirkzeit gründlich mit klarem Wasser (Trinkwasserqualität) nachspülen.

Gemäß EU-Medizinprodukteverordnung sind Anwender/Patienten verpflichtet, alle im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde des EU-Mitgliedsstaats, in dem der Anwender/Patient niedergelassen ist, zu melden.

Anwendungshinweise

Einsatz in Vliestuchspendersystemen: **CLEANISEPT** eignet sich gut zur Verwendung in Vliestuchspendersystemen mit einer begutachteten Desinfektionsleistung und einer Standzeit von bis zu 42 Tagen in Kombination mit den ONE

SYSTEM-Vliestuchspendersystemen (PET-Vlies) oder einer Standzeit von bis zu 28 Tagen in Kombination mit den DESCO/ECO WIPES-Vliestuchspendersystemen (PET-Vlies).

Zusammensetzung

100 g enthalten: 6,66 g Alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid, 3,33 g Didecyldimethylammoniumchlorid.

Materialverträglichkeit

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten auf Oberflächen und Medizinprodukten. (siehe Seite 4 – 7)

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Inhalt/Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen.

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

CLEANISEPT®



PREVENT

WIRKUNGSSPEKTRUM UND EINWIRKZEITEN

3 / 9



WIRKUNGSSPEKTRUM UND EINWIRKZEITEN			1 min	5 min	15 min	30 min	60 min
Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion mit Mechanik							
bakterizid, levurozid	EN 13727 EN 13624 EN 16615	hohe Belastung	7,5 %		2,5 %	1 %	
begrenzt viruzid	EN 14476	niedrige und hohe Belastung	7,5 %		2 %	1,25 %	
wirksam gegen Noroviren	EN 14476	hohe Belastung					7,5 %
Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion in nicht-medizinischen Bereichen							
bakterizid	EN 1276	niedrige und hohe Belastung		0,5 %			
levurozid	EN 1650	hohe Belastung		0,5 %			

CLEANISEPT®



PREVENT

MATERIALVERTRÄGLICHKEIT

4 / 9



MATERIAL METALLE	nicht empfohlen	bedingt empfohlen	empfohlen	ANWENDUNGEN PRODUKTBEISPIELE
Edelstahl V2A				Medizinische Transportstühle
Edelstahl V4A				Toilettenstühle
Aluminium				Rollatoren

CLEANISEPT®



PREVENT

MATERIALVERTRÄGLICHKEIT

5 / 9



MATERIAL KUNSTSTOFFE: ELASTOMERE	nicht empfohlen	bedingt empfohlen	empfohlen	ANWENDUNGEN PRODUKTBEISPIELE
PUR (Polyurethan)			•	Medizinische Transportstühle
Silikon			•	Beatmungsmasken
			•	Medizinische Tastaturen und Mäuse
Latex			•*	
EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-(Monomer)-Kautschuk)			•	
CR (Chloropren-Kautschuk)			•	

* Bei diesen Materialien die Materialverträglichkeit vorab an einer kleinen unauffälligen Stelle testen.

CLEANISEPT®



PREVENT

MATERIALVERTRÄGLICHKEIT

6 / 9



MATERIAL KUNSTSTOFFE: THERMOPLASTE	nicht empfohlen	bedingt empfohlen	empfohlen	ANWENDUNGEN PRODUKTBEISPIELE
PE-HD (Polyethylen-High Density)			•	Lager- und Transportbehälter
POM (Polyoxymethylen)			•	Sitzschalen
PA (Polyamid)			•	Röntgenschürzen
PSU (Polysulfon)			•	Gehäusekomponenten
PVC (Polyvinylchlorid)			•	
PMMA (Polymethylmethacrylat)			•	Acryl- und Plexiglas, Inkubatoren
PC (Polycarbonat z.B. Makrolon)	•			Ultraschallgeräte
	•			EKG-Geräte
ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer)	•			Patientenüberwachungsmonitore
	•			Medizinische Tastaturen und Mäuse

CLEANISEPT®



PREVENT

MATERIALVERTRÄGLICHKEIT

7 / 9



MATERIAL TEXTILIEN UND OBERFLÄCHEN	nicht empfohlen	bedingt empfohlen	empfohlen	ANWENDUNGEN PRODUKTBEISPIELE
Kunstleder (z.B. mit PVC und PUR-Deckschicht)			* Untersuchungs- und Behandlungsliegen * Gynäkologischer Untersuchungsstuhl	
			* Dentalstühle * OP-Liegen	
PVC (Polyvinylchlorid) (2 %)			Fußboden	
Holzfußboden (2 %)				
Linoleum (2 %)			* Fußboden	

* Bei diesen Materialien die Materialverträglichkeit vorab an einer kleinen unauffälligen Stelle testen.

FLÄCHE / DESINFEKTIONSMITTELKONZENTRATE

CLEANISEPT®



PREVENT

HERSTELLERFREIGABEN

8 / 9



Honeywell

GEBINDE

pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

CE 0123

Produkt	Gebinde	VE	Inhalt	Art. Nr.	PZN
CLEANISEPT	Dosierflasche	10	1 L	00-204-010	01834724
	Flasche	6	2 L	00-204-020-01	16202237
	Kanister	3	5 L	00-204-050	01834747
	Kanister	1	10 L	00-204-100	01834753

Nationale Angaben können abweichen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unsere Niederlassung oder den Händler vor Ort.

ZERTIFIZIERUNGEN



Unter folgendem Link finden Sie unsere Zertifikate und Siegel:

<https://www.schumacher-online.com/de/zert>

Dr. Schumacher ist zertifiziert nach DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, BS OHSAS 18001, verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem nach EMAS und ist Mitglied im IHO, VCI, BAH, DGSV und bei der DGKH.

FLÄCHE / DESINFEKTIONSMITTELKONZENTRATE

CLEANISEPT®



PREVENT

PRODUKTFAMILIE IM ÜBERBLICK

9 / 9



CLEANISEPT WIPES



CLEANISEPT WIPES MAXI



CLEANISEPT WIPES



CLEANISEPT



EMPFOHLENE VLIESTUCHSPENDERSYSTEME



ONE SYSTEM+ PLUS



ONE SYSTEM BASIC



DESCO WIPES



ECO WIPES