



Gebrauchsfertiges Tuch für den Einsatz in Kombination mit einem Mopphalter für Böden und harte Oberflächen.

mikrozid® power mop

Unser Plus

- sporizid (inkl. C. difficile)
- ready-to-use
- einfache Handhabung
- gute Materialverträglichkeit

Anwendungsgebiete

Einsatz für Böden und andere harte Oberflächen.

Anwendungshinweise

Zur Verwendung mit einem geeignetem Mopphalter mit Kletthaftung. Handschuhe tragen. Mopp entnehmen und wischen. Auf vollständige Benetzung achten. Deckel der Spenderbox abnehmen. Folienbeutel in Spenderbox einlegen und öffnen. Deckel wieder fest verschließen.

Haltbarkeit nach Anbruch: 1 Monat. Bei alternativer Anwendung ohne Spenderbox ist das Produkt innerhalb eines Tages zu verbrauchen. Wiederbefüllbare Spenderbox, geeignet nur für die Verwendung mit einem Nachfüllpack mikrozid power mop! Nur für berufsmäßige Verwender.

Mikrobiologische Wirksamkeit

Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit
bakterizid EN13727, EN16615 - hohe Belastung	gebrauchsfertig	5 Min.
mykobakterizid EN16615 - hohe Belastung	gebrauchsfertig	15 Min.
mykobakterizid EN14348 - hohe Belastung	gebrauchsfertig	60 Min.
fungizid EN13624, EN16615 - hohe Belastung	gebrauchsfertig	15 Min.

Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit
begrenzt viruzid PLUS EN14476 - hohe Belastung	gebrauchsfertig	5 Min.
viruzid EN14476 - hohe Belastung	gebrauchsfertig	30 Min.
sporizid EN17126 - hohe Belastung	gebrauchsfertig	60 Min.
Clostridium difficile EN17126 - hohe Belastung	gebrauchsfertig	15 Min.
Clostridium difficile EN16615 - hohe Belastung	gebrauchsfertig	5 Min.

Listungen

- VAH-Zertifikat



Produktdaten

Zusammensetzung:

100 g Lösung enthalten an wirksamen Bestandteilen: 0,0048 g Peressigsäure, 0,12 g Glycolsäure, weitere Inhaltsstoffe: Wasserstoffperoxid

Besondere Hinweise

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

mikrozid[®] power mop weist gegenüber Standard-Bodenbelägen und Materialien, mit denen mikrozid[®] power beim bestimmungsgemäßen Einsatz üblicherweise in Kontakt kommt, eine sehr gute Materialverträglichkeit auf.

Verpackung nur vollständig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Füllgutreste können mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Vorsichtsmaßnahmen: Schutzhandschuhe tragen. Nicht zur Desinfektion von Buntmetallen und säureempfindlichen Oberflächen geeignet. Im Zweifel ist die Eignung vor der erstmaligen Anwendung an unauffälliger Stelle zu prüfen.

mikrozid power mop:

mikrozid power mop Set:

Karton mit 1 Eimer + Refill mit 20 Tüchern

Artikel Nummer: 70003372

mikrozid power mop Refill:

Karton mit 2x Refill Bag mit 20 Tüchern

Artikel Nummer: 70003237

Zubehör:

Equipment:

Karton mit 1 x Wandhalterung

Artikel Nummer: 60000501

Karton mit 1 x Wischmophalter

Artikel Nummer: 60000488

Karton mit 6 x Klettpad

Artikel Nummer: 60000490

Gutachten und Information

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter www.schuelke.com.

Für individuelle Fragen:

Application Department

Telefon: +49 40 52100-666

E-Mail: info@schuelke.com

Manufacturer:
S.U.MO. GmbH
Kirchstr. 28
21227 Bendestorf
GERMANY
Tel. +49 40 328907271

Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
mikrozid power mop M Refill 20 ST BT	2/Karton	70003237 PZN: 17889756
mikrozid power mop Set Refill 20er + Box	1/Karton	70003372

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

schülke Hauptsitz
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Deutschland
Tel. +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com